

台紙 包装 品川インテグレーションA棟28F
108-6028 東京都港区港南2-15-1
株式会社BWS

■材質:表生地:ポリエステル 裏フェルト/TPR(ソール)/黄色部:硬質TPR
■型番:BGsol-L7 ■サイズ:(約)28cm×10cm×1.5cm ■重量:(約)145g

MADE IN CHINA

フェルトインソール
SIZE L

ご注意
●本製品は歩行時に足裏に受ける衝撃を軽減するものです。衝撃をなくすものではありません。足に障害のある方は、使用前に医師に相談してください。●靴に合ったサイズを選んでください。●着用可能なインソールがある場合は取り外してからご使用ください。●歩行障害・糖尿病の方、足裏に傷・湿疹・ハシ等がある方は、医師に相談の上でご使用ください。●汚れた場合は中性洗剤で手洗いした後、乾いた布で水気を拭き取り、陰干ししてください。●破損・変形したものはご使用にならないでください。●色移りする場合がありますので、淡色の靴下を履いてご使用の場合はご注意ください。●商品やパッケージは予告なく仕様変更する場合がありますので、ご了承ください。

お手入れ
お手入れは中性洗剤で手洗いした後、乾いた布で水気を拭き取り、陰干ししてください。乾燥機はお避けください。

注意
シューズにより前足部の大きさが異なりますので、切りすぎにご注意ください。

インソールの表面に目安となるサイズの線が表記されています。まず、ご自身のサイズよりやや大きめにカットし、実際にシューズに入れて少しく調整してください。

インソールのカット方法

Blue Gel Insoles
ブルーゲルインソール

いつでも快適にウォーキング!

クッション性と安定したサポート力を追求したインソール



アーチサポート (硬質TPR)

アーチサポートが優れたクッション性のハニカムゲルを安定させ、かかと部分をしっかりホールド! アキレス腱・膝・股関節の負担を軽減し、長時間歩いても疲れにくい構造になっています。

ハニカムゲル

こんな場合でお勧めします

- 運動する時
- 立ち仕事
- 大きめの靴のサイズ調整
- 底の薄い靴、硬い靴をご利用方
- 足裏の痛み軽減
- 疲労緩和サポート
- 傷んだ中敷きの交換用

SIZE L 男女兼用 自分のサイズに合わせてカットできます
25.5~28cm

台紙 包装 品川インテグレーションA棟28F
108-6028 東京都港区港南2-15-1
株式会社BWS

■材質:表生地:ポリエステル 裏フェルト/TPR(ソール)/黄色部:硬質TPR
■型番:BGsol-M ■サイズ:(約)25cm×8.5cm×1.5cm ■重量:(約)110g

MADE IN CHINA

フェルトインソール
SIZE M

ご注意
●本製品は歩行時に足裏に受ける衝撃を軽減するものです。衝撃をなくすものではありません。足に障害のある方は、使用前に医師に相談してください。●靴に合ったサイズを選んでください。●着用可能なインソールがある場合は取り外してからご使用ください。●歩行障害・糖尿病の方、足裏に傷・湿疹・ハシ等がある方は、医師に相談の上でご使用ください。●汚れた場合は中性洗剤で手洗いした後、乾いた布で水気を拭き取り、陰干ししてください。●破損・変形したものはご使用にならないでください。●色移りする場合がありますので、淡色の靴下を履いてご使用の場合はご注意ください。●商品やパッケージは予告なく仕様変更する場合がありますので、ご了承ください。

お手入れ
お手入れは中性洗剤で手洗いした後、乾いた布で水気を拭き取り、陰干ししてください。乾燥機はお避けください。

注意
シューズにより前足部の大きさが異なりますので、切りすぎにご注意ください。

インソールの表面に目安となるサイズの線が表記されています。まず、ご自身のサイズよりやや大きめにカットし、実際にシューズに入れて少しく調整してください。

インソールのカット方法

Blue Gel Insoles
ブルーゲルインソール

いつでも快適にウォーキング!

クッション性と安定したサポート力を追求したインソール



アーチサポート (硬質TPR)

アーチサポートが優れたクッション性のハニカムゲルを安定させ、かかと部分をしっかりホールド! アキレス腱・膝・股関節の負担を軽減し、長時間歩いても疲れにくい構造になっています。

ハニカムゲル

こんな場合でお勧めします

- 運動する時
- 立ち仕事
- 大きめの靴のサイズ調整
- 底の薄い靴、硬い靴をご利用方
- 足裏の痛み軽減
- 疲労緩和サポート
- 傷んだ中敷きの交換用

SIZE M 男女兼用 自分のサイズに合わせてカットできます
23~25cm